

BD™ Trubbig uppdragningskanyl

Ett säkrare alternativ

- Trubbig uppdragningskanyl minimerar risken för stickskada samt risken för utstansning av gummipartiklar
- Trubbig uppdragningskanyl med filter har även ett 5µ filter för att minimera risken att dra upp glaspartiklar vid uppdragning från glasampuller. Ett 5µ filter minskar risken för att eventuella glaspartiklar injiceras med upp till 98-99%¹



1. Sabon R.L., et al. *Anesthesiology*, 70(1989);p 859-862; 10ml ampoules



Handhavandeinstruktion:

1a) Fäst kanylen ordentligt på sprutan.

1b) Avlägsna kanylskyddet. Kanylskyddet har en väl synlig röd färg och kan därmed enkelt identifieras.

2) Penetrera membranet i mitten och med 90° vinkel för att minimera risken för utstansning av partiklar.

Obs! Detta kan kännas trögare då det är en trubbigare slipvinkel än en vanlig 18G injektionskanyl.

3) Kassera använd kanyl i behållare för stickande/ skärande avfall enligt lokala föreskrifter.



Observera att vid användning av uppdragningskanyl med filter kan det även upplevas något trögare att aspirera läkemedel. Detta beror på att läkemedlet måste passera filtret vilket genererar ett visst motstånd.

Observera även att vid användning av uppdragningskanyl med filter skall vätskan aspireras något långsammare än du är van vid, detta reducerar turbulens och undviker att luftbubblor skapas.

Om Ni har några frågor eller önskar mer information vänligen kontakta BD representant **Selma Hedlund** på telefon: **070-339 61 00**.

