

FLEXIBLE SCALER

FLEXIBLE SCALER Art. 268

Beskrivelse

Svært tynn rustfri stålstrimmel med mange perforeringer. Kantene på disse perforeringene er svært skarpe og fungerer som fine skalere for å fjerne interproksimal tannstein, flekker og rester av resinsement etter liming av porselensrestaureringer.

Garanterer ekstrem nøyaktighet i perforeringen av hvert hull. Kantene på hver perforering fungerer som en interdental skaler.



Bruk

Klipp av den lengden på strimmelen du trenger for riktig håndtering. Sett stripen inn i incisal- eller okklusalembasuren og beveg den fasialt og lingvalt for å fjerne uønskede avleiringer. Når du fjerner resinsement, er det lurt å bevege stripen fra porselen til tann, i hvert fall i begynnelsen. Vær forsiktig så du ikke skader tannkjøttet eller leppene, da kantene er ganske skarpe. Vær også forsiktig når du bruker den på rotoverflater, hvor for aggressiv bruk kan fjerne for mye sement. Vi anbefaler ikke bruk på kompositt.

Sterilisering

Kan steriliseres med hvilken som helst metode og gjenbrukes eller kastes etter hver bruk.

Emballasje

Rull i en selvdispenserende eske. Veldig kompakt og ikke sløsende.
Rustfritt stål, 2 m lengde.

Bruksanvisning

På siden av esken. Kort og enkel.

Fotografier tatt med elektronmikroskop som viser det mikrometriske relieffet på perforeringene. Takket være denne teknologien rengjør og polerer **Flexibles Scaler** uten å skade emaljen.

