


DMG MiniDam

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
093363/2026-02

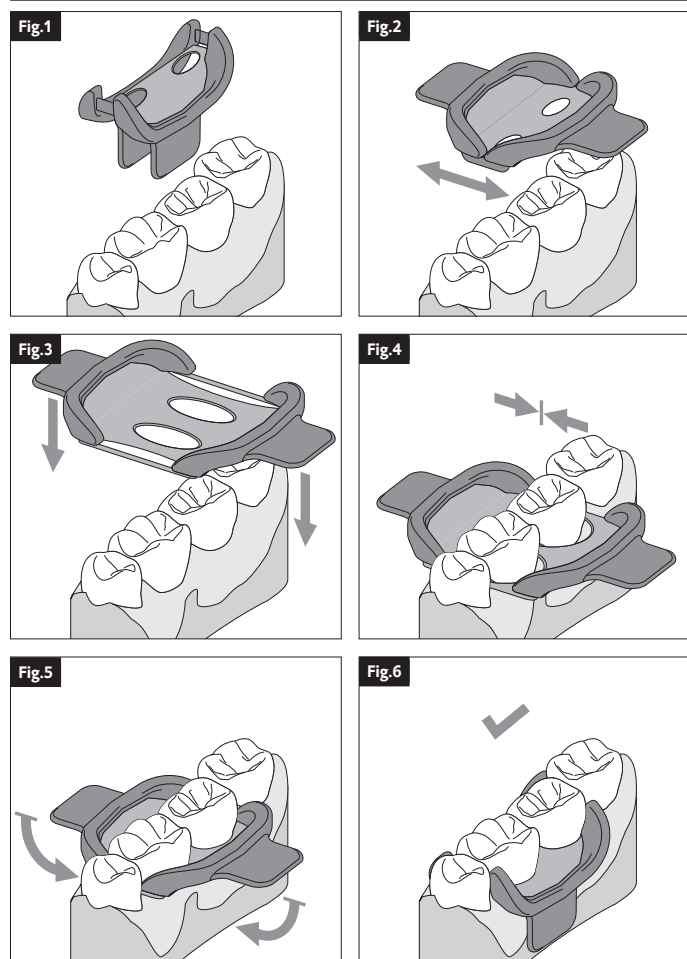

Håndtering



Bruksanvisning

Norsk

Produktbeskrivelse

Gingivalbeskyttelsesenheden består av silikon og brukes for å legge til rette for et relativt tørt miljø i det proksimale området mellom to tenner og for å beskytte gingiva mot dentale materialer.

Tiltenkt bruk

Etablering av et relativt tørt miljø ved komplett tannsett, for eksempel ved bruk av Icon eller komposittfyllingsmaterialer.

Bruksbegrensninger

Ikke egnet for å etablere et helt tørt miljø.

Indikasjoner

- Karies
- Fluorose
- Idiopatiske eller traumbetingede flekker

- Tap av tannsubstans på grunn av traume, tannabrasjon eller utviklingsforstyrrelser

Kontraindikasjoner

Ikke bruk materialet dersom det er kjente allergier mot noen av komponentene eller kontaktallergier.

Pasientmålgruppe

Personer som behandles i løpet av en tannbehandling.

Tiltenkt bruker

Tannlege

Merknader for bruk

- DMG MiniDam er til engangsbruk og kan av hygieniske grunner bare brukes på én pasient.
- Unngå å skade gingivalbeskyttelsesenheden med tanntråd eller andre materialer. Ikke bruk skadde gingivalbeskyttelsesenheter.

Anbefalt bruk

1. Rengjør arbeidsområdet.
2. Hvis tennene står svært tett: separer tennene ved hjelp av en kile.
3. Forstrekk gingivalbeskyttelsesenheden ved forsiktig å trekke tappene fra hverandre.
4. Plasser gingivalbeskyttelsesenheden over de berørte tennene. Sørg for at tappene peker i retning av området som skal behandles (fig. 1).
5. Trekk tappene fra hverandre (fig. 2).
6. Plasser den interdental delen av gingivalbeskyttelsesenheden i proksimal posisjon.

Merk: Den midtre interdental delen brukes til å beskytte arbeidsområdet.

7. Trekk gingivalbeskyttelsesenheden mot gingiva til de interdental delene er plassert i det proksimale området (fig. 3).
8. Slipp gingivalbeskyttelsesenheden (fig. 4).
9. Brett gingivalbeskyttelsesenheden cervikalt der tennene er isolert.
10. Brett tappene cervikalt (fig. 5).
11. Fjern kiler etter behov.
12. Kontroller at gingivalbeskyttelsesenheden sitter korrekt, og korreger om nødvendig (fig. 6).
13. Ytterligere tiltak for å legge til rette for et tørt miljø (f.eks. bomullsuller, sug) kan utføres ved behov.
14. Utfør behandlingen.
15. Fjern gingivalbeskyttelsesenheden og kast den.

Samhandling

Ingen interaksjoner med andre materialer er for tiden kjent.

Gjenværende risikoer/bivirkninger

Det er for tiden ingen kjente bivirkninger. Den gjenværende risikoen for overfølsomhet overfor komponentene i materialet kan ikke utelukkes.

Advarsler/forholdsregler

- Oppbevar utilgjengelig for barn!
- Følg produsentens instruksjoner for andre produkter som brukes sammen med materialet/materialene.
- Alvorlige hendelser som involverer dette produktet må rapporteres til produsenten og til ansvarlige registreringsmyndigheter.

Ytelseegenskaper for produkt

- Rivestyrke ≥ 15 [N]
- Strekkfasthet ≥ 15 [mm]

Lagring/avhending

- Oppbevares tørt ved 15 til 25 °C (59 til 77 °F)
- Avhend i henhold til nasjonale forskrifter.

Sammensetning

Silikonelastomerer (ca. 99 %), pigmenter, tilsetningsstoffer

Pakning

20 stk.

REF 220381