

Peroxy Ag+

Desinfeksjonsmiddel for vannledninger i odontologiske utstyrsenheter

Produkt for profesjonelt bruk

Bruksanvisning:

Desinfeksjon: følg bruksanvisningen for utstyrsenheten og hell det ufortynnede produktet (3 % hydrogenperoksid) i den spesielle desinfeksjonsmiddelbeholderen i utstyrsenheten. Uavhengig bakteriostatisk beskyttelse av vanntilførselen: 20 ml av produktet pr. liter (destillert) vann i tilførselsbeholderen slik at man får en hydrogenperoksidkonsentrasjon på 600 ppm.

Sammensetning:

3 % hydrogenperoksid, sølvioner 0,001 % som Ag+, stabilisator, vann q.s.

Aktivitet i utstyrsenhetens vannrør og -ledninger: 3 % hydrogenperoksid har vist seg være et effektivt mykobaktericid-, baktericid- og fungicid-middel etter 10 minutters kontakt. En oppløsning i en konsentrasjon av 600 ppm har vist seg å være effektiv for å hindre vekst av mikrobakterier i vannledningene.

Advarsler:

Må brukes i henhold til bruksanvisningene for den odontologiske utstyrsenheten. P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden klær. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.