



Varios Combi Pro2

Daglig vedlikehold

Start hver morgen: Slå på maskinen hver morgen med knappen på baksiden. Den skal stå på hele dagen.

- **VIKTIG:**
Bruk **subgingivalt pulver (PERIO/GLYCIN)** og **supragingivalt pulver (KALSIUMKARBONAT)** i hver sin separate pulverbeholder – de skal ha ulike trykk/pulverpartikkelstørrelse og **får ikke blandes**. Velg trykk manuelt: **Prophy- eller Perio Mode** avhengig av indikasjon. (OBS Jet-tip på Periohåndstykke skal/kan brukes på Prophy Mode)

Etter hver Airpolish-behandling

1. Legg håndstykket i CLM-holderen i en vask, skål eller lignende og dekk over for å beskytte mot aerosoler.
2. Sett opp vannvolumet til 10 på pulversiden og trykk på knappen **"AC" (Auto Cleaning)** i 3–4 sekunder (touchknapp på forsiden, høyre side), velg så "W" (WATER) og trykk på "AC" igjen.
 - Maskinen skyller og rengjør slanger og håndstykker innvendig, en slange om gangen.
 - Tar ca 45 sekunder pr slange.
 - For IPIEZO: Gjør dette kun om du har brukt kjemikalier i beholderen.
3. Løft prophy- eller periohåndstykket ut av sin holder og trykk på nedoverpil:
i 2 sekunder for å tømme pulverbeholderen for trykk.
 - Skal alltid gjøres ved bytte av beholder eller ved påfylling av pulver.
 - Trykk inn knappen på siden av beholderen for å løfte den opp.

Rengjøring av håndstykkene

- Vaskes i desinfektor (helst i stativ for gjennomskylling), tørk nøye og autoklaver etter hver pasient. (Følg anbefaling for smittevern i odontologisk praksis, 2018.)
 - Airpolish/Periopolish-håndstykkene kan skrues i fra hverandre og rengjøres i ultralydsbad. Enten om de er tette eller som rutine 1x pr. uke.
-

Kveld: Perio/Airpolish, pulversiden

1. Ta av pulverbeholderne, tøm ut pulveret og blås ut med trevegssprøyten.
2. Legg håndstykket i CLM-holderen i en vask, skål eller lignende og dekk over for å beskytte mot aerosoler.
3. Sett opp vannvolumet til 10 på pulversiden og trykk på knappen **"AC" (Auto Cleaning)** i 3–4 sekunder (touchknapp på forsiden, høyre side), velg så "P" (POWDER) og trykk på "AC" igjen.
 - Maskinen tømmer pulverbeholder, slanger og håndstykker innvendig for pulver, i tillegg til at de skylles grundig. Forebygger tett beholder og slanger.
 - Tar ca 45 sekunder pr slange.
4. Kjør maskinen uten pulver:
 - Kjør 10 sekunder, vent 10 sekunder, gjenta en gang til.
5. Børst bort alt løst pulver fra maskin, pulverbeholder og overgangene til håndstykkene.
 - Viktig: IKKE FUKT på disse deler!

Kveld: Scalersiden og Perio/Airpolish, pulversiden

1. Ta av pulverbeholderne, tøm ut pulveret og blås ut med trevegssprøyten.
 2. Legg begge håndstykkene i CLM-holderen i en vask, skål eller lignende og dekk over for å beskytte mot aerosoler. Sett opp vannvolumet til 10 på både scaler- og pulversiden og trykk på knappen **"AC" (Auto Cleaning)** i 3–4 sekunder (touchknapp på forsiden, høyre side), velg så "D" (DUAL) og trykk på "AC" igjen. Begge sidene blir nå gjennomspylt.
-

1-2 ganger i uken:

Dekontaminering / forebygging av biofilmvekst i maskinen/slangene (CLM Mode)

1. Fyll CLM-flasken med B.Clean og sett den på maskinen (der den vanlige vannbeholderen sitter). Ta håndstykkene av slangene og sett slangene i CLM holderen. Trykk inn "CLM" knappen i 3-4 sekunder til det står CLM 10 på displayet. Trykk så inn "CLM" knappen en gang til i 3 sekunder til CLM programmet starter, når det står SET 10 på displayet kan du slå av maskinen og vente 12 timer. Slå av maskinen.
2. Sett i gang maskinen og ta bort CLM flasken. Fyll på den vanlige vannflasken med vann og sett den i maskinen. Trykk på "CLM" knappen til gjennomskyllingen starter, dette er ferdig når det står FIN 10 på displayet.
 - Gjør denne prosedyren 1-2 ganger pr uke.

Avslutningsvis

- Smør o-ringene regelmessig, ca. en gang pr. uke. Bytt dem ca.hver tredje måned.
- Steng av maskinen.
- Håndstykkene vaskes i desinfektor og autoklaveres.
- Sprit av hele maskinen.

OBS! Det er viktig å lese bruksanvisningen nøye og følge anbefalt vedlikehold.

Lykke til!

Se video om vedlikehold her: <https://www.nsk-dental.com/support/clinical-case/>

Vi kan også anbefale våre kurs, se NSK Academy for mer informasjon:
<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/no/kurs/>