

BRILLIANT Lumina

Bruksanvisning

NO

Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk av produktet. Oppbevares for å kunne slå opp i senere.

1. PRODUKTBESKRIVELSE

BRILLIANT Lumina er et profesjonelt tannblekingsprodukt med to komponenter (gel og aktivator). Produktet er utformet for én behandling.

2. FUNKSJON

BRILLIANT Lumina er beregnet på å eksternt bleke tennene med det formål å kosmetisk forbedre pasientens smil.

MERK

Resultatet av blekingen avhenger av pasientens kliniske situasjon. Fyllinger kan måtte byttes ut etter behandlingen.

3. INNHOLDSTOFFER (INCI)

Gel: Vann, ftalimidoperoksidapropionsyre, glyserin, xantangummi, mononatriumsitrat, pvm/ma-kopolymer, natriumhydroksid, C12-15 pareth-3

Aktivator: Vann, natriumhydroksid

4. KONTRAINDIKASJONER

Skal ikke brukes i tilfeller med kjent allergi mot produktets innholdstoffer.

Produktet skal ikke brukes på pasienter som ikke er del av den tiltenkte pasientgruppen.

5. FORHOLDSREGLER

Det må brukes vernebriller og vernehansker under klargjøring av gelen.

FARE

Gel: Unngå kontakt med øynene. Skyll grundig med vann dersom produktet kommer i kontakt med øynene.

Aktivator: Ikke la den komme i direkte kontakt med mennesker (hud/øyne/slimhinner). Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Kontaminerte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll grundig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette er mulig. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Absorber spill for å hindre materiell skade.

6. BIVIRKNINGER/INTERAKSJONER

Irritasjon av tannkjøttet og/eller munnslimhinnen kan oppstå hvis den flytende kofferdammen ikke er plassert riktig, eller den blandede gelen kommer i kontakt med bløtvev. Fjern umiddelbart gelen fra vevet med vått gasbind og skyll området grundig.

7. BRUKER-/PASIENTGRUPPE

Påføring skal kun utføres av tannlegepersonell. Passer for alle pasientgrupper inkludert eldre, unnatt barn og gravide og ammende kvinner, pasienter med oral sykdom (f.eks. periodontal sykdom) og/eller alvorlig syke pasienter.

8. KLARGJØRING

Før blekeprosedyren må en profesjonell tannrens utføres (fullstendig fjerning av biofilm).

Sett på plass munnåpneren. Legg bomullsruller mellom leppene og tennene. Tørk tannoverflaten og tannkjøttet med en treveis sprøyte.

① Utfør isoleringsprosedyren med den flytende kofferdammen i samsvar med produsentens bruksanvisning.

9. KORREKT BRUK

En behandling består av 4 påføringssykluser på 15 minutter hver:

② Tilsett 3 dråper med aktivator til et glass med gel.

③ Bland med spatelen i 60 sekunder for å forme en homogen pasta.

④ Påfør gelen på tennene med en spatel.

⑤ La gelen virke i 15 minutter.

⑥ Aspirer gelen av tennene. Tørk av gjenværende gel med en bomullsrull. Ikke bruk vann.

Gjenta trinn ② til ⑥ tre ganger.

⑦ Når behandlingen er fullført, skyll munnen med vann i 60 sekunder.

⑧ Fjern tannkjøttbarrieren fullstendig i samsvar med produsentens bruksanvisning.

MERK

Sikre alltid at tannkjøttbarrieren sitter på plass. Pasienten kan behandles flere ganger med BRILLIANT Lumina. Det skal være minst 14 dagers opphold mellom hver behandling.

10. OPPBEVARING

Utløpsdato: Se sekundæremballasjen

Oppbevaringstemperatur: 15–25 °C / 59–77 °F

Oppbevares på et tørt sted

11. KASSERING

Kan kastes sammen med restavfallet når dette gjøres i samsvar med gjeldende forskrifter og etter konsultasjon hos godkjente renovasjonsselskaper og ansvarlige myndigheter. Kast kun emballasje som er helt tom.

12. RAPPORTERINGSPLIKT

Alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med dette produktet, må umiddelbart rapporteres til produsenten.



Cobea AG
Weiheracherstrasse 8
CH-8114 Dänikon

EU Responsible Person

Cobea GmbH
Rathausstraße 15/1/7
AT-1010 Wien

UK Responsible Person

Coltène/Whaledent Ltd.
Kendal House, Victoria Way
Burgess Hill, RH15 9NF/UK

COLTENE International Dental Group

Customer Center

service@coltene.com

Made in Switzerland

COLTENE