



# LuxaForm



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH  
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com  
092968/2022-06



## Bruksanvisning

Norsk

### Produktbeskrivelse

LuxaForm er en termoplastisk støpepolymer.

### Tiltenkt bruk

Avtrykk for midlertidige reparasjoner.

### Begrensninger av bruk

Ikke bruk LuxaForm til å ta avtrykk av mer enn 5 tenner.

### Indikasjoner

Alle tannsituasjoner som krever indirekte restaurering, dvs. tapt tann, karies og traume.

### Kontraindikasjoner

Ikke bruk materialet der hvor det foreligger kjente allergier overfor noen av komponentene eller kontaktallergi.

### Pasientmålgruppe

Personer som undergår behandling som del av en dentalprosedyre.

### Tiltenkte brukere

Tannleger, tannhelsepersonell

### Merknader for bruk

- Myknet LuxaForm fester seg til hansker. Kna alltid LuxaForm uten hansker på. For innsetting i munnen isoleres hanskens fingertupper med vaselin.
- For å sikre sikker fjerning skal LuxaForm ikke formes for tett rundt tennene når det tas avtrykk i munnhulen.
- Blokker ut eventuelle undersnitt med et egnet middel, som voks.
- Ikke bruk LuxaForm til å ta avtrykk av mer enn 5 tenner.
- Utfør eventuell nødvendig etterbehandling av avtrykket med skalpell.
- Avtrykkene beholder formen sin i månedsvis og kan også gjenbrukes senere, dvs. hvis en midlertidig restaurering går i stykker.

### Anbefalt bruk

1. Plasser en LuxaForm-tablett per tannavtrykk i varmt vann som holder ca. 70 °C, til materialet er mykt og gjennomsiktig (ca. 1 minutt). For flere avtrykk brukes det antallet tabletter som trengs. Tablettene kan eltes sammen når de har blitt gjennomsiktige.
2. Form det gjennomsiktige materialet til en firkant og press det rundt tannen som det skal tas avtrykk av.

**Merk:** Etter at det avkjøles, blir materialet raskt hardt og ugjennomsiktig blått. Det kan kjøles ned raskt ved å spraye det raskt med vann.

3. Fjern herdet LuxaForm fra tannen og isoler det med vaselin eller et annet skillemiddel.

**Merk:** Ved bruk av materialer til midlertidige kroner og broer, skal den innledende temperaturen ikke overskride 25 °C.

4. Påfør materiale til midlertidig krone eller bro (f.eks. Luxatemp Star) på vanlig måte.

### Interaksjoner

Bruk aldri sammen med materiale til midlertidig krone eller bro som inneholder MMA.

### Gjenværende risikoer/bivirkninger

Det foreligger ingen kjente bivirkninger. Restfaren for overfølsomhet overfor bestanddeler i materialet kan ikke utelukkes.

### Advarsler/forholdsregler

- Kun til dental bruk!
- Oppbevares utilgjengelig for barn!
- Unngå kontakt med øyne! Ved utilsiktet kontakt med øyne skal disse umiddelbart skylles grundig med store mengder vann, rådfør deg med lege ved behov.
- Følg produsentens bruksanvisning for andre produkter som brukes med materialet/materialene.
- Alvorlige hendelser som omfatter dette produktet, skal rapporteres til produsenten og til ansvarlige lokale myndigheter.

### Enhetens ytelseegenskaper

Stabil opptil ca. 55 °C.

### Lagring/kassering

- Oppbevares på tørt sted ved 15 til 25 °C (59 til 77 °F)!
- Beskyttes mot direkte sollys!
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen!
- Kassering må overholde nasjonale standarder.

### Sammensetning

Polykaprolakton (ca. 98 %), tilsetningsstoffer, pigmenter

### Pakning

72 Tabletter	
	REF 110415