

Flairesse Foam



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
093336/2025-12



Bruksanvisning

Norsk

Produktbeskrivelse

Profylakseskum for sluttbehandling som del av profesjonell tannrengjøring (PTC) og for integrering i en individuell forebyggingsplan. Flairesse Foam er tilgjengelig i tre forskjellige smaker.

Tiltenkt bruk

Støtter remineralisering av emalje etter profesjonell tannrengjøring.

Bruksbegrensninger

Ikke bruk materialet dersom pasientens kontroll over svelgereflexen ikke er garantert.

Indikasjoner

Tenner med høy risiko for karies

Kontraindikasjoner

Ikke bruk materialet dersom det er kjente allergier mot noen av komponentene eller kontaktallergier.

Pasientmålgruppe

Personer som behandles i løpet av en tannbehandling.

Tiltenkte brukere

Tannlege/tannpersonell

Merknader for bruk

- Rist godt i minst 30 sekunder før hver bruk.
- Hvis materialet påføres i pasientens munnhule med en applikator til engangsbruk, skal applikatoren av hygieniske årsaker kun benyttes til denne ene pasienten.
- Dispenseren er utstyrt med en tuklingssikker forsegling. Sørg for at den tuklingssikre forseglingen er intakt før første gangs bruk.
- Når du bruker dispenseren for første gang, brekker du dysen av ved å skyve den forsiktig fremover.

Anbefalt bruk

Forsiktig! Risiko for svelging dersom spyttsoget er utilstrekkelig. Spytt må suges grundig bort under behandlingen.

Merk: Å aktivere dysen én gang produserer nok materiale til én tannbue.

- Hold dispenseren vertikalt med dysen pekende ned i påføringsskjeen.
- Aktiver dysen for å presse ut skummet i påføringsskjeen.
- Tørk tannoverflatene.
- Plasser påføringsskjeen på tannbuen.
- La påføringsskjeen ligge på tannbuen i 1 minutt.
- Fjern påføringsskjeen når responstiden er over.
- Få pasienten til å spytte ut overflødig profylakseskum.

Merk: For garantert effektivitet må pasienten informeres om at de ikke skal gjøre følgende i 30 minutter etter bruk av profylakseskummet:

- spise
- drikke
- skylle munnen

Samhandlinger

Ingen kjente interaksjoner.

Gjenværende risikoer/bivirkninger

- Vi legger stor vekt på kvaliteten på produktene våre. Kontrollér imidlertid produktet for skader og synlig forurensning før bruk.
- Å svelge store mengder av materialet kan forårsake kvalme.
- Overfølsomhet og/eller allergiske reaksjoner kan ikke utelukkes hos personer som er tilsvarende predisponerte.

Advarsler/forholdsregler

- Kun til dental bruk.
- Unngå kontakt med øyne! Ved utilsiktet kontakt med øyne må du umiddelbart skylle grundig med store mengder vann, samt rådføre deg med lege ved behov.
- Følg produsentens instruksjoner for andre produkter som brukes sammen med materialet/materialene.
- Ikke spray mot åpen ild.
- Trykkbeholder. Må ikke åpnes med makt. Må ikke punkteres eller brennes.
- Må ikke svelges.
- Alvorlige hendelser som involverer dette produktet må rapporteres til produsenten (productsafety@mtcompanies.com) og til ansvarlige registreringsmyndigheter.

Ytelseegenskaper for produkt

Fluorinnhold: ca. 12 300 ppm

Lagring/avhending

- Oppbevares tørt ved 15 til 25 °C (59 til 77 °F)!
- Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
- Holdes borte fra direkte sollys.
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Avhend i henhold til nasjonale forskrifter.

Sammensetning

Vann (ca. 88 %), natriumfluorid (< 3 %), tilsetningsstoffer (< 10 %)

Fritt for aspartam, gluten og sakkarin.

Fritt for CFC.

Inneholder xylitol.

Pakning

1 Dispenser à 125 g	
Peppermynthe	REF 220408
Melon	REF 220409
Jordbær	REF 220410