


DMG Retraction Paste



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgastraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
093364/2026-02



Håndtering

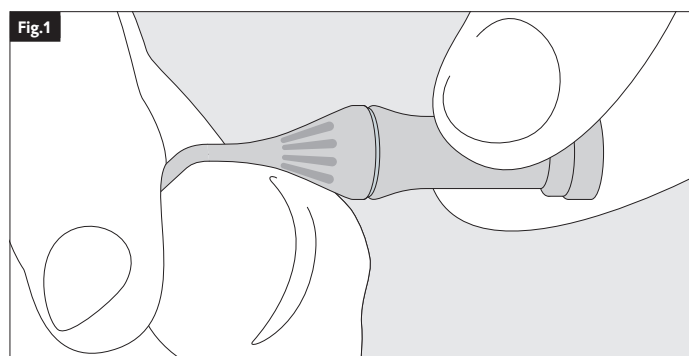

Bruksanvisning Norsk

Produktbeskrivelse

DMG Retraction Paste er et retraksjonsmiddel for utvidelse av sulcus og har en sammentrekkende effekt på gingiva.

Tiltenkt bruk

For midlertidig marginal gingival retraksjon og etablering av et tørt sulcusmiljø ved sunt periodontium.

Bruksbegrensninger

Ikke bruk ved eksponert ben, avansert periodontopati eller eksponerte furkasjonsdefekter.

Indikasjoner

Alle dentale tilfeller som krever endelige avtrykk av preparerte tenner, f.eks. ved tanntap, karies og traume.

Kontraindikasjoner

Ikke bruk materialet dersom det er kjente allergier mot noen av komponentene eller kontaktallergier.

Pasientmålgruppe

Personer som undergår behandling som del av en dentalprosedyre.

Tiltenkt bruker

Tannlege

Merknader for bruk

- Hvis materialet påføres i pasientens munnhule med en applikator til engangsbruk, skal applikatoren av hygieniske årsaker kun benyttes til denne ene pasienten.
- Bruk compulen umiddelbart etter åpning av aluminiumsposen. Kast restmateriale i compulen.

Anbefalt bruk (for bilde, se «Håndtering»)

- Preparér tannen.
- Plasser compulen i en egnet dispenser.
- Bøy tuppen på compulen i ønsket posisjon om nødvendig (fig. 1).
- Press ut en liten mengde pasta på en miksepute og kast den.

- Hvis den kliniske situasjonen krever det, plasser en retraksjonstråd i sulcus.
- Skyll sulcus med vann og tørk.
- Plasser materialet langsomt i sulcus rundt den preparerte tannen til sulcus er helt fylt. Bruk eventuelt kompresjonshetter eller andre kompresjonsprodukter.
- La materialet virke i maks. 2 minutter for å muliggjøre gingival retraksjon. Hold det behandlede området tørt mens materialet virker.
- Forsiktig: For lang virketid i munnen kan føre til irritasjon av gingiva. Ikke overskrid intraoral herdetid.
- Fjern materialet fullstendig fra sulcus og munnhulen med en kombinasjon av luft og vann og ved bruk av sug.
- Hvis sterkere retraksjon er nødvendig, gjenta prosessen fra trinn 6. Om nødvendig kan en tynn retraksjonstråd brukes i tillegg.
- Ta avtrykket.

Samhandling

Rester av materialet kan føre til unøyaktigheter eller forsinket herding av avtrykksmaterialet.

Gjenværende risikoer/bivirkninger

Det er for tiden ingen kjente bivirkninger. Den gjenværende risikoen for overfølsomhet overfor komponentene i materialet kan ikke utelukkes.

Advarsler/forholdsregler

- Kun til dental bruk!
- Oppbevar utilgjengelig for barn!
- Unngå kontakt med øyne! Ved utilsiktet kontakt med øyne skal disse umiddelbart skylles grundig med store mengder vann, rådfør deg med lege ved behov.
- Ikke svelg materialet. Ved utilsiktet svelging, kontakt lege
- Følg produsentens instruksjoner for andre produkter som brukes sammen med materialet/materialene.
- Alvorlige hendelser som involverer dette produktet må rapporteres til produsenten og til ansvarlige registreringsmyndigheter.

Ytelseegenskaper for produkt

Utvider sulcus.

Lagring/avhending

- Oppbevares ved 15–25 °C / 59–77 °F.
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Bruk compulen umiddelbart etter åpning av aluminiumsposen. Kast restmateriale i compulen.
- Kassering må overholde nasjonale standarder.

Sammensetning

Kaolin, aluminiumkloridheksahydrat, vann, pigment E133

Pakning

25 compuler à 0,37 g	
	REF 919381