

Flairesse Paste



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
093337/2025-12



Bruksanvisning Norsk

Produktbeskrivelse

Tannrens- og poleringspasta for profesjonell tannrengjøring og polering av tannoverflater som del av en profylaktisk behandling. Flairesse Paste leveres som en Single-use unit eller tube og finnes i en rekke smaker. De tre ulike kornstørrelsene på pastaene muliggjør en gradert respons på hver pasients situasjon, avhengig av hvilket rengjøringsnivå som kreves.

Tiltenkt bruk

- Fjerning av overfladisk myk og hard plakk.
- Fjerning av ytre misfarginger (f.eks. misfarginger fra kaffe, te eller tobakk).

Bruksbegrensninger

Ikke bruk materialet dersom pasienten ikke kan kontrollere svelgerefleksen.

Indikasjoner

- Ytre misfarginger
- Tannplakk

Kontraindikasjoner

Ikke bruk materialet dersom det er kjente allergier mot noen av komponentene eller kontaktallergier.

Pasientmålgruppe

Personer som undergår behandling som del av en dentalprosedyre.

Tiltenkte brukere

Tannlege, tannpersonell

Merknader for bruk

- Hvis materialet påføres i pasientens munnhule med en applikator til engangsbruk, skal applikatoren av hygieniske årsaker kun benyttes til denne ene pasienten.
- Du kan bruke alle profylaksevinkelstykker eller poleringskopper til engangsbruk på markedet.
- DMG anbefaler å bruke profylaksepastaene én etter én (med reduksjon av kornmengden). Bruk børster på okklusale overflater.
- Enheten til engangsbruk og tuben er utstyrt med en tuklingsikker forsegling.
- Sørg for at den tuklingsikre forseglingen er intakt før første gangs bruk.

Anbefalt bruk

Forsiktig! Feil bruk kan føre til overoppheting.
► Sørg for at det er tilstrekkelig materiale i poleringskoppen som brukes.

Forsiktig! Risiko for svelging dersom spyttsoget er utilstrekkelig.
► Spytt må suges grundig bort under behandlingen.

Bruk av pastaen fra enheten til engangsbruk

Merk: Hver enhet til engangsbruk inneholder nok materiale til én profylaktisk behandling. Hver enhet til engangsbruk kan bare brukes av én enkelt pasient.

- Trekk forseglingen av enheten til engangsbruk ved hjelp av fliken, og avhend den.
- Sett enheten til engangsbruk i riktig profylakseholder.
- Ved fylling setter du poleringskoppen på lav hastighet og skyver den inn i profylaksepastaen for å suge opp materialet.
- Bruk poleringskoppen til å påføre profylaksepastaen i 20 sekunder per tann ved 3000 til 5000 o/min.

- Sug bort overflødig profylaksepasta og la pasienten spytte den ut.

Påføre pastaen fra tuben

Merk: Lukk tuben så snart du har pumpet ut materialet for å forhindre at det tørker ut.

- Når du bruker en tube for første gang, skru du av korken, fjerner den tuklingsikre forseglingen ved hjelp av fliken, og avhender den.
- Press ut en tilstrekkelig mengde av materialet på en miksepute.
- Ved fylling setter du poleringskoppen på lav hastighet og skyver den inn i profylaksepastaen for å suge opp materialet.
- Bruk poleringskoppen til å påføre profylaksepastaen i 20 sekunder per tann ved 3000 til 5000 o/min.
- Sug bort overflødig profylaksepasta og la pasienten spytte den ut.

Samhandlinger

Ingen kjente interaksjoner.

Gjenværende risikoer/bivirkninger

- Vi legger stor vekt på kvaliteten på produktene våre. Kontrollér imidlertid produktet for skader og synlig forurensning før bruk.
- Å svelge store mengder av materialet kan forårsake kvalme.
- Overfølsomhet og/eller allergiske reaksjoner kan ikke utelukkes hos personer som er tilsvarende predisponerte.

Advarsler/forholdsregler

- Kun til dental bruk.
- Unngå kontakt med huden! Ved utilsiktet hudkontakt, vask det berørte området grundig med såpe og vann umiddelbart.
- Unngå kontakt med øyne! Ved utilsiktet kontakt med øyne skal disse umiddelbart skylles grundig med store mengder vann, rådfør deg med lege ved behov.
- Følg produsentens instruksjoner for andre produkter som brukes sammen med materialet/materialene.
- Må ikke svelges.
- Alvorlige hendelser som involverer dette produktet må rapporteres til produsenten (productsafety@mtcompanies.com) og til ansvarlige registreringsmyndigheter.

Ytelseegenskaper for produkt

Fluorinnhold: ca. 12 300 ppm

Lagring/avhending

- Oppbevares tørt ved 15 til 25 °C (59 til 77 °F)!
- Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
- Holdes borte fra direkte sollys.
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Kassering må overholde nasjonale standarder.

Sammensetning

Pimpstein (ca. 47 %), glyserol (ca. 35 %), vann (ca. 9 %), natriumfluorid (< 3 %), fosforsyre (< 2 %), tilsetningsstoffer (ca. 5 %)
Fritt for aspartam, gluten og sakkarin.
Inneholder xylitol.

Pakning

200 Single-use units à 1,8 g, 1 profiring	
Peppermynte fin	REF 220414
Peppermynte medium	REF 220415
Peppermynte grov	REF 220416

1 Tube à 75 ml	
Peppermynte fin	REF 220417
Peppermynte medium	REF 220418
Peppermynte grov	REF 220419
Melon fin	REF 220423
Melon medium	REF 220424
Melon grov	REF 220425