

DeltaFil Conditioner



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
093358/2026-02



Brakerhåndbok

Norsk

Produktbeskrivelse

DeltaFil Conditioner er en vandig polyakrylsyreløsning for behandling av smear layer etter preparering og for kondisjonering av kaviteten, som optimaliserer bondingen av DeltaFil til tannens struktur.

Tiltenkt bruk

- Behandling av smear layer
- Kondisjonering av kaviteten

Bruksbegrensninger

Påføring utelukkende i kombinasjon med DeltaFil

Indikasjoner

- Tap av tannsubstans på grunn av karies, frakturer, tannslitasje eller utviklingsforstyrrelser
- Sekundær forebygging av karies

Kontraindikasjoner

- Ikke bruk materialet dersom det er kjente allergier mot noen av komponentene eller kontaktallergier.

Pasientmålgruppe

Personer som undergår behandling som del av en dentalprosedyre

Tiltenkte brukere

Tannlege

Merknader for bruk

- Lukk flasken nøye etter bruk og oppbevar den beskyttet mot lys.

Anbefalt bruk

Hell DeltaFil Conditioner i en blandeskål eller på en miksepute. Påfør DeltaFil Conditioner med en bomullspellet eller miniapplikatorsvamp, påfør på den preparerte overflaten og la virke i 10 s. Skyll deretter grundig med vann. Fjern eventuelt overskuddsvann (f.eks. med en bomullspellet eller ved forsiktig lufttørring). Den preparerte overflaten skal fortsatt se fuktig ut, klar for videre behandling. Ikke overtørk hardvevet!

Samhandling

DeltaFil Conditioner skal ikke påføres på syreløselige underlag.

Gjenværende risikoer/bivirkninger

- Det er for tiden ingen kjente bivirkninger. Den gjenværende risikoen for overfølsomhet overfor komponentene i materialet kan ikke utelukkes.
- Kontakt mellom DeltaFil Conditioner og slimhinne kan forårsake hudirritasjon. Skyll det berørte området grundig med vann.

Advarsler / forholdsregler

- Oppbevar utilgjengelig for barn!
- Unngå kontakt med hud! Ved utilsiktet hudkontakt, vask det berørte området grundig med såpe og vann umiddelbart.
- Unngå kontakt med øynene! Ved utilsiktet kontakt med øynene, skyll umiddelbart grundig med rikelig med vann og kontakt lege om nødvendig.

- Følg produsentens anvisninger for andre produkter som brukes sammen med materialet/materialene.
- Alvorlige hendelser som involverer dette produktet må rapporteres til produsenten og til ansvarlige registreringsmyndigheter.

Ytelseegenskaper for produkt

Forbedrer adhesiv binding mellom tannvev og DeltaFil.

Lagring / avhending

- Oppbevares ved 15–25 °C (59–77 °F) på et tørt!
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen!

Sammensetning

Vann, polyakrylsyre, tilsetningsstoffer

Pakning

1 Flaske à 8 g	
	REF 520020