

Bruksanvisning

DELER TIL DIN BLADEFLASK

INDIKATOR:
VISER HVILKEN VEI SKARP
SIDE SKAL MØTE.


DENNE SIDE PÅ
SKALPELL HÅNDTAKE
KALLES EGG.



MONTER TIL VEGG ELLER BENKEPLATE

1. Har du ikke montert din BladeFLASK, forbered monteringsfeste*

A FESTET HAR TO-SIDIG TAPE PÅ UNDERSIDEN

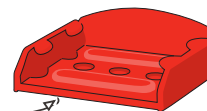

B ELLER BENYTT SKRUER
* SE MONTERINGSANVISING I FESTE FORPAKNING



2. BladeFLASK kan monteres til vegg eller bordplate




SKYV INN I FESTET

NOTER: BLADEFLASK SKAL VÆRE FESTET TIL MONTERINGSFESTET UNDER BRUK.

FJERNING AV BLAD EN HÅNDSTEKNIKK


1. Plasser bladet på landingsplate med den skarpe side mot høyre. (egg skal til høyre)

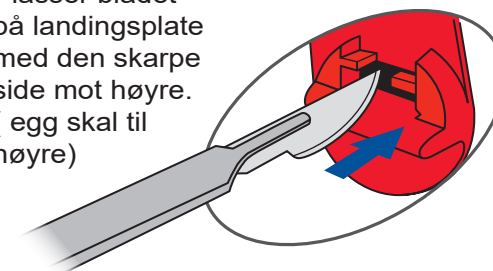

2. Skyv skallhåndtaket inn i BladeFLASK til man hører ett klikk.



3. Fjern håndtaket.

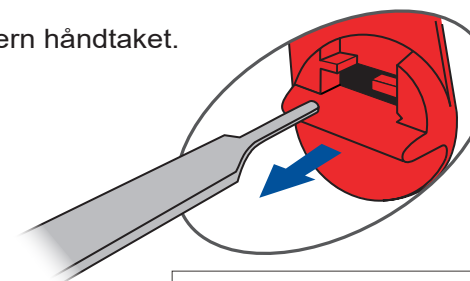

NOTER: BladeFLASK blir behandlet som medisinsk avfall etter 100 blader er satt inn.