


Re-Treaty kit - Bruksanvisning

Maksimal torque: 1.5N • cm Rotasjons hastighet: 350~500rpm

Vennligst les igjennom bruksanvisningen før du benytter Retreaty kit.

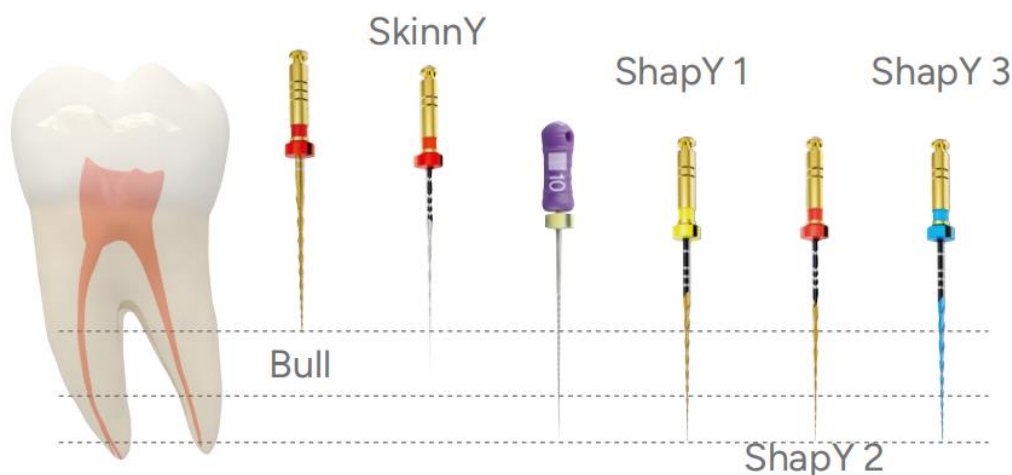

Re-Treaty kit anbefales for fjerning av rotfyllingsmaterialer fra rotkanalen under en ikke-kirurgisk endodontisk rebehandling. Rebehandlingen innebærer å få tilgang til pulpakammeret igjen, fjerne de intra-kanale rotfyllingsmaterialene før du går videre til en ny rotkanalbehandling.

| Size | Length | Taper | Torque | Speed | Cross Section |
|-----------------|------------|-------|---------|------------|---------------|
| Bull #25/.07 | 21mm | 07 | 1.5N•cm | 350~500rpm | |
| SkinnY #25/.04 | 21/25/31mm | 04 | 1.5N•cm | 350~500rpm | |
| ShapY 1 #20/.05 | 21/25/31mm | 05 | 1.5N•cm | 350~500rpm | |
| ShapY 2 #25/.05 | 21/25/31mm | 05 | 1.5N•cm | 350~500rpm | |
| ShapY 3 #30/.05 | 21/25/31mm | 05 | 1.5N•cm | 350~500rpm | |

Advarsler

1. Kun erfarne tannleger har lov til å benytte systemet.
2. Sørg for å sterilisere produktene før bruk.
3. Benytt dette produktet kun til tannhelse og tannbehandlinger.

Kontraindikasjoner og forbud

Ikke bruk dette produktet til en pasient som indikerer sensibilisering og allergisk reaksjon.

Strukturer og prinsipper

1. Disse instrumentene skal kun benyttes i et klinisk miljø eller sykehusmiljø, av kvalifiserte brukere.
Applikasjonsfelt: forming og rengjøring av rotkanalsystemet. Det er ikke-sterilt instrument.

2. Sammensetning

- 1) Arbeidsdel: nikkeltitan legering.
- 2) Skaft: rustfritt (nikkel · Chrome · 24 Gull inkludert).

Indikasjoner for bruk

Produktene er tilpasset re behandling og behandling av endodontisk sykdom utført av kvalifiserte tannleger som allmennleger samt Endo-spesialister

Spesifikasjoner

I henhold til bestemmelsene i ISO 3630 ytelsestest overstiger holdbarheten og vridningsevnen til produktene spesifisert verdi av vår standard.

Anbefalinger

1. Rengjør spirene ofte.
2. Se ofte etter forvrengninger eller slitasje på filen. Tilsett vannkjøling ofte og rikelig.
3. Følg de anbefalte innstillingene for RPM - Torque.
4. Start prosedyren etter kasus analysen.
5. Arbeid med rikelig med irrigasjonsvæske i rotkanalen.
6. Påfør et mykt trykk på instrumentet og bruk bevegelser som for plukking eller børsting.

Instruksjoner for bruk















1. Gjennomgå forskjellige horisontalt vinklede røntgenbilder for å diagnostisk bestemme bredden, lengden og krumningen til en gitt rot og dens kanal (er).
2. Forbered en tilgang som gjør det enkelt å identifisere hver kanalåpning
3. Introduser Bull på åpningsnivå i kontakt med gutta-percha med en roterende eller reciprokerende bevegelse med klokken. Fjern Guttapercha ved åpning og tredje koronalnivå uten å skyve hvis passiv penetrasjon ikke er oppnådd.
4. Introduser SkinnY ved å fjerne Guttapercha i den midtre delen av rotkanalsystemet. Beveg instrumentet 1-3 mm med milde bevegelser inn og ut rotkanalen.
5. Bruk en k-fil for å måle elektronisk arbeidslengden og nå apex området på passiv måte.
6. Introduser ShapY 1 ved arbeidslengden etterfulgt av ShapY 2 og ShapY 3 for å justere den endelige utformingen av kanalen.

Metode for sterilisering:

Sett dette produktet i en steriliseringspakke (eller folie) og legg det på et steriliseringsbrett for autoklavsterilisering med henvisning til følgende vilkår.

Vilkår for sterilisering:

1. Steriliser med damp ved 134 ° C (273 ° F) / 2,1 bar / 18 min for endodontisk instrumentsandfylling.
2. Ikke bruk høytrykks dampsterilisator som varmer opp mer enn 200 grader Celsius, inkludert tørkeprosess.
3. Når du bruker instrumentet på nytt, vask bort fremmedlegemer helt og steriliser.
4. Når det gjelder bruk av medisinsk rengjøringsmiddel, følg bruksanvisningen fra produsenten nøye.
5. Kast produktet hvis det er skadet eller redusert ytelse.

| | |
|---|--|
|  Handle Right angle RA |  Recommended Rotation Speed |
|  Nickel titanium |  Expiring date |
|  Silicone |  CE Certificate |
|  Medical device |  Manufacturer |
|  Batch code |  EU Authorized Representative |
|  Quantity |  Caution |
|  Autoclavable at the specified temperature |  Consult instructions for use |

EC REP

SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam,
Netherlands



**Shenzhen Perfect
Medical Instruments Co., Ltd**

Room 103, Building 3, No. 2, Weiqun
Road, 4th Community, Henggang
Street, Longgang District, Shenzhen

*Steriliserte produkter er underlagt den faktiske steriliseringsetiketten

Minimum emballasjeehet: 5 stk. pr pakke (#25/.06,#25/.04,#20/.05,#25/.05,#30/.05)

Sortiment: 1 stk. fra hver størrelse pr pakke (#25/.06, #25/.04, #20/.05, #25/.05, #30/.05)

www.dental-perfect.com

sales@dental-perfect.com

TEL: 0755-28540953

FAX: 0755-28540953