

Flairesse Varnish



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
093338/2025-12



Bruksanvisning

Norsk

Produktbeskrivelse

Fuktighets- og spytterolerant lakk for behandling av hypersensitive tenner og for påføring på emalje og dentin som del av en profylaktisk behandling. Flairesse Varnish leveres som en Single-use unit og finnes i to forskjellige smaker.

Tiltenkt bruk

- Behandling av overfølsomme tenner
- Forsegling av overfølsomme sprekker og eksponert rottdentin
- Beskyttende lakk for forebygging av karies
- Remineralisering av begynnende karies

Bruksbegrensninger

Ikke bruk materialet dersom pasienten ikke kan kontrollere svelgereflexen.

Indikasjoner

- Overfølsomhet i tennene
- Postoperative sensitiviteter
- Begynnende karies
- Tenner med høy risiko for karies

Kontraindikasjoner

- Ikke bruk materialet dersom pasientens tannkjøtt er sårt.
- Ikke bruk materialet dersom pasienten lider av stomatitt.
- Ikke bruk materialet dersom det er kjente allergier mot noen av komponentene eller kontaktallergier.

Pasientmålgruppe

Personer som undergår behandling som del av en dentalprosedyre.

Tiltenkte brukere

Tannlege, tannpersonell

Merknader for bruk

- Hvis materialet påføres i pasientens munnhule med en applikator til engangsbruk, skal applikatoren av hygieniske årsaker kun benyttes til denne ene pasienten.
- Enheten til engangsbruk er utstyrt med en tuklingssikker forsegling. Sørg for at den tuklingssikre forseglingen er intakt før første gangs bruk.

Anbefalt bruk

Merk: Hver enhet til engangsbruk inneholder nok materiale til én profylaktisk behandling. Hver enhet til engangsbruk kan bare brukes av én enkelt pasient.

- Fjern kalk og plakk.
- Fjern spytt og væske fra behandlingsområdene.
- Trekk forseglingen av enheten til engangsbruk ved hjelp av fliken, og avhend den.
- Ta penselen og bruk den til å blande lakken forsiktig.
- Bøy børsten etter behov for behandlingen.
- Påfør et tynt, jevnt lag med lakk på behandlingsområdene.
- La virke i 4 timer.

Merk: For å la lakken virke i over 4 timer, må pasienten informeres om at følgende skal unngås i denne perioden:

- fast føde
- alkoholholdige drikker

- alkoholbaserte munnskyllemidler
- tannpuss
- tanntråd

Samhandling

- Andre reseptbelagte produkter som inneholder fluor skal ikke brukes innen 24 timer etter påføring av lakken.
- Pasienter som bruker jevnlig, systemisk fluoridering skal slutte å bruke disse produktene i 2 eller 3 dager etter påføring av denne lakken.

Cjenværende risikoer/bivirkninger

- Vi legger stor vekt på kvaliteten på produktene våre. Kontrollér imidlertid produktet for skader og synlig forurensning før bruk.
- I sjeldne tilfeller kan bruk av produktet føre til ødematøse problemer hos pasienter som lider av astma.
- I sjeldne tilfeller kan omfattende påføring føre til ødematøs hevelse i tannkjøttet.
- Å svelge store mengder av materialet kan forårsake kvalme.
- Overfølsomhet og/eller allergiske reaksjoner kan ikke utelukkes hos personer som er tilsvarende predisponerte.

Advarsler/forholdsregler

- Kun til dental bruk.
- Unngå kontakt med øyne! Ved utilsiktet kontakt med øyne skal disse umiddelbart skylles grundig med store mengder vann, rådfør deg med lege ved behov.
- Følg produsentens instruksjoner for andre produkter som brukes sammen med materialet/materialene.
- Må ikke svelges.
- Alvorlige hendelser som involverer dette produktet må rapporteres til produsenten (productsafety@mtcompanies.com) og til ansvarlige registreringsmyndigheter.

Ytelseegenskaper for produkt

Fluorinnhold: ca. 22 600 ppm

Lagring/avhending

- Oppbevares tørt ved 20 til 25 °C (68 til 77 °F)!
- Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
- Holdes borte fra direkte sollys.
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Kassering må overholde nasjonale standarder.

Sammensetning

Naturharpiks (kolofonium, ca. 59 %), etanol (ca. 27 %), natriumfluorid (ca. 5 %), tilsetningsstoffer (ca. 10 %)

Fritt for aspartam, gluten og sakkarin.

Inneholder xylitol.

Pakning

35 Single-use units à 0,4 g	
Peppermynnte	REF 220404
Melon	REF 220405