

Bruksanvisning – NanoSeal Total+

BrilliantSmile



Bruksanvisning NanoSeal Total+

Etter slutført tannblekingsprosedyre:

Benytt munnvinkelholder til å forenkle appliseringen (la munnvinkelholderen være på plass under hele prosessen).

Flern eventuelle rester av flytende kofferdam (Protector) som ble brukt under klinikkblekingen.

Appliser NanoSeal Total+ direkte på den tørre ferdigblekede tannoverflaten.

Gå over samtlige tenner i tre omganger, slik at tennene blir ordentlig beskyttet.

Benytt engangs-quicksticks og engangs-begerne som følger med i pakken.

Appliser med fordel også på blottagte tannhalsar og mellom tennene.

NanoSeal Total+ er selvhærdende og tørker raskt, samt behøver ikke herdes med lys.

Skyll nøye i pasientens munn etter slutført forsegling.

Hver forpakning rekker til ca. 20 behandlinger.

OBS! Tenner som ikke er ferdig bleket, må IKKE forsegles!



REE 8579

BrilliantSmile Nordic AB
Stryngången 10, SE-417 64 Göteborg
+46 77 141 41 41

CE 0482